

飛沫感染防止アイテム

フェイスシールド 日本製

クリアシールド部は約26×26cmのワイドサイズ

やわらかい樹脂製フレームは装着感がよく顔幅を選びません

シールド部は高透明で視界良好 交換は工具なしでOK

顔とクリアシールド部に空間があり通気性に優れくもりにくい

フェイスシールド F260-RW

固定式 シールド交換タイプ

※クリアシールド2枚付属

フレーム部分の調整ゴムでサイズの調節ができます。
メガネを掛けたまま違和感なく装着できます。




フェイスシールド F260-MW

可動式 シールド交換タイプ


※クリアシールド2枚付属

シールド部が可動式で、跳ね上げ・角度調節が可能です。
フレーム部分の調整ゴムでサイズの調節ができます。
メガネを掛けたまま違和感なく装着できます。

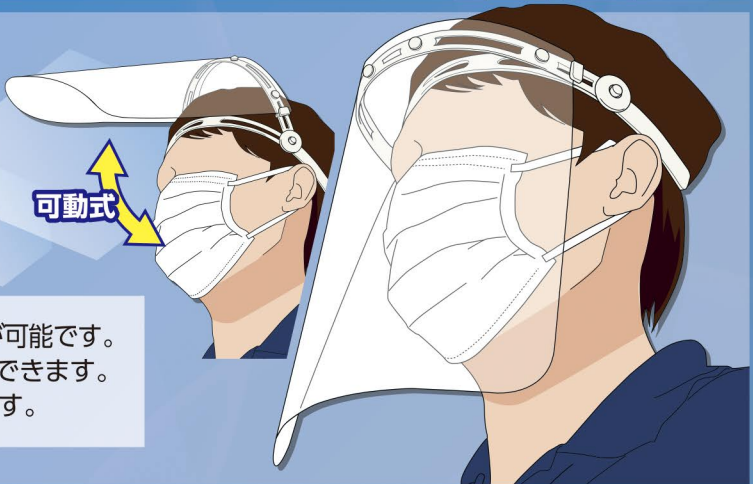

フェイスシールド F260-RW/MW用 替えシールド (1パック10枚入)

フェイスシールドF260-RW/F260-MW専用のクリアシールドです。

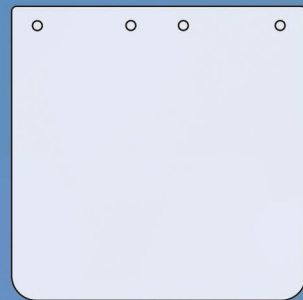

フェイスシールド

商品名	定価	商品番号	シールド部サイズ(約)	全重量(約)	材質	JANコード
F260-RW(固定式)	1,000	03805	260×260mm	53g	フレーム部分:PP/クリアシールド部:PET(0.188mm)	4962819038055
F260-MW(可動式)	1,100	03806	260×260mm	50g	フレーム部分:PP/クリアシールド部:PET(0.188mm)	4962819038062
F260-RW/ MW用替えシールド(10枚入)	2,660	03808	260×260mm	20g	PET(0.188mm)	4962819038086

※F260-RW/MW用替えシールドの全重量は1枚の重さになります。 ※F260-RW/MWの全重量はフレームにクリアシールド1枚を取付けた重さになります。

フェイスシールドシリーズは空気中の細菌・ウィルス・唾液・ほこり・花粉などから顔を守る為の物ですが、ウィルスを遮断し、感染を予防される効果は証明されていません。眼部・鼻腔・口腔粘膜を同時に保護する事が出来ませんが、完全に密閉する物ではありません。着用する事で感染の予防になります。マスクと併用されますと効果が高まります。

飛沫感染防止アイテム フェイスシールド 日本製

フェイスシールド A型

スポンジ付きゴム固定式

使い捨てタイプ

シールド部サイズ 約26×26cm

透明度の高い素材を使用・超軽量の45gで
おでこにあたる部分にスポンジがついており装着感が良い。
ゴムでの装着で伸縮性もあり顔幅を選びません。
メガネを掛けたまま違和感なく装着できます。




フェイスシールド F350-SC (1パック10枚入)

簡易組み立て式

使い捨てタイプ

シールド部サイズ 約35×24cm

透明度の高い素材を使用・超軽量の25gで装着感が良く、
サイズ調整は止め穴が4段階。片側が蛇腹状になっているので
伸縮性もあり、着け心地に圧迫感がなく顔幅を選びません。
メガネを掛けたまま違和感なく装着できます。

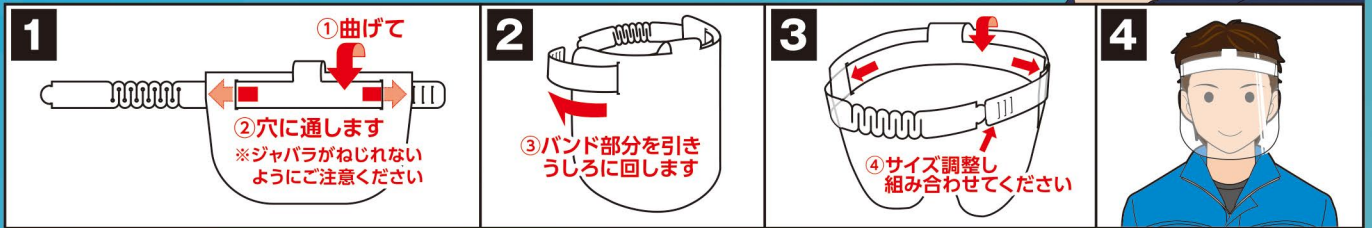

フェイスシールド

商品名	定価	商品番号	シールド部サイズ(約)	全重量(約)	材質	JANコード
A型	800	03823	260×260mm	45g	シールド部:PET(0.25mm)/スポンジ部:ポリウレタンフォーム	4962819038239
F350-SC(10枚入)	2,660	03804	350×240mm	25g	PET(0.2mm)	4962819038048

※フェイスシールドF350-SCの全重量は1枚の重さになります。

⚠️ ご注意

- PP(フレーム部)及びPET(クリアシールド部)は可燃性の物質です。火気周辺や高温環境では使用しないでください。
- PP(フレーム部)及びPET(クリアシールド部)は耐熱性に優れていません。熱によって変形する恐れがあります。熱源から離れた場所での作業などにのみご使用ください。
- 本製品は滅菌処理しておりません。
- 耐衝撃・耐熱・耐防護用ではありません。
- 有害粉塵・有毒ガスを防ぐ目的では使用できません。そのような効果はありません。

DOGYU

発売元 **土牛産業株式会社**
製造元 **井本双物株式会社**

本社 兵庫県三木市別所町巴38番地 TEL 0794-82-0880(代)
東京営業所 東京都中央区日本橋浜町3丁目39-3 TEL 03-5614-0085
商品に関するお問い合わせ TEL 0794-82-1611

製品情報は
公式HPより
check!!

